

TSungenreinigung schreibt man ab sofort mit „TS“!

Der neue TS1 ist ein revolutionäres, effektives Hilfsmittel zur schonenden und professionellen Tiefenreinigung der Zunge bis zum Zungengrund. Er entfernt in weniger als einer Minute effektiv bakterielle Zungenbeläge. Durch den Saugeffekt werden die Papillen aufgestellt, im Anschluss wird der Biofilm schonend ohne jegliche Mikrotraumen an den Papillen abgesaugt.

Der TS1 ist somit die ideale Ergänzung bei jeder professionellen Zahnreinigung und im Rahmen der Full Mouth Desinfection sowie der Halitosis-Therapie – willkommen in der Zukunft der Zungenreinigung!

Anwendung des TS1 Zungensaugers



patent pending



www.ts-1.com

Vorbereitung:



Zusätzlich benötigte Materialien:


- Standard Einmal-Speichelsauger mit abnehmbarer Kappe.
- Mullkomresse 5x5 cm zum Halten der Zunge.
- Einweghandschuhe.
- Optional: Zungenreinigungsgel.

- Es wird dringend empfohlen **Einweghandschuhe** zu tragen, da es sich um ein **Hygieneprodukt** handelt.
- Die Schutzkappe des Speichelsaugers abnehmen.
- Den **TS1 Zungensauger** auf den Speichelsauger sorgfältig aufstecken **bis der Schlauch das Sichtfenster vollständig ausfüllt**.
- Dann den Schlauch auf den dafür vorgesehenen Absaugadapter stecken.

Schritt 1 (optional): Zungenreinigungsgel auf die Zunge aufbringen



1. Das Zungenreinigungsgel auf die Dosiermulde der genoppten Applikationsfläche auftragen.

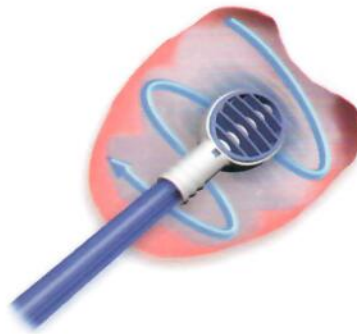


2. Die Zunge mit einer feuchten Mullkomresse an der Zungenspitze leicht festhalten und das Reinigungsgel in serpentinartigen Bewegungen auf der Zunge applizieren.

Schritt 2 : Zungenbelag sanft absaugen



1. Den **TS1 Zungensauger** umdrehen und mit der Lamellenseite in leichten hin und her Bewegungen von der Zungenspitze zur Zungenwurzel und zurück bewegen, so dass die Papillen sich aufrichten.

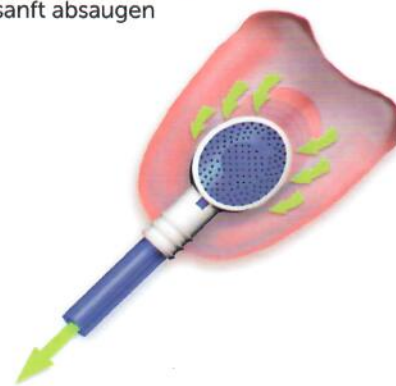

2. Abschließend den Zungenbelag vom Zungengrund gleichmäßig absaugen.